

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta. Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää, 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja ruuvien. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.

Nousutuki koostuu:

- A) Ylätuki
- B) Kiinnitysosa
- C) Lattiatuki

Asennusohje:

1. Asenna muoviliuskat sängyn ja sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (toinen jalka- ja toinen pääpuolen jalkojen alle)

2. Avaa pidätinruuveja sen verran, että tuki liikkuu korkeussuunnassa, vaihda tarvittaessa "kätisyys" siten, että yläputken pidempi pää on jalkapäätyyn päin.

3. Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60-80 cm:n etäisyydelle päädyistä ja kiristä kiinnitystassut 1 ja 2 kuusiokoloavaimella. (Kiristä vuorotellen kireäksi)

4. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysojan pidätinruuvi 3 kuusiokoloavaimella.

5. Kiristä lattiatuen sormiruuvi. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

6. Tarkista kaikki kiristykset 1,2, 3 ja 4.


7. Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta.

8. Tarkista vielä että nousutuki on tukevasti kiinni.

-Nousutuki on käyttövalmis

HUOM!

Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.

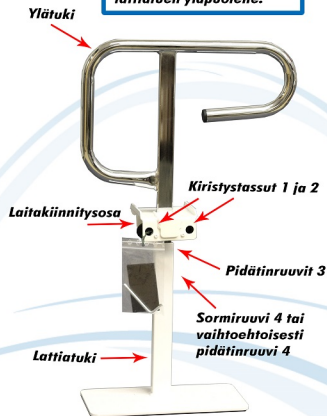

TARKISTA KIINNITYSTASSUJEN JA PIDÄTINRUUVIEN KIREYS SÄÄNNÖLLISIN VÄLEIN.
HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA. NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTORITUIHIIN SÄNKYIHIN.

KÄYTTÖOHJE NOUSUTUET

654 100 | 654 200 | 654 120 | 654 220