



**Tukimet Oy
Valajantie 5
26820 RAUMA
www.tukimet.fi**

**Myynti:
Tukimet@tukimet.fi
puh. (02) 677 4222**

**KÄYTTÖOHJE
336 180 WC-KOROTTAJA**





Pakettiin kuuluu wc-korottaja
käsituet 2 kpl
ja pikalukkokeristimet 2 kpl

et tarvitse työkaluja asentaessasi
korottajaa.

Asennuohjeet:

1. Poista rengas ja kansi wc-istuimes-
tasi. (useimissa malleissa irrotus
tapahtuu nostamalla.)

2. Irrota kiinni olevat pikalukkokiinnittimet seuraavasti:

- Löysää pikalukkoa kiertämällä sitä muutaman kerran vastapäivään.
- Ota kiinni pikalukon yläosasta kuvassa 1. esitetyllä tavalla, purista voimakkaasti
ja vedä sitä alaspäin jolloin pikalukko naksahdtaa ja saat sen vedettyä pois
tapista (kuva 2). (Huomaa että pikalukko ei irtoa, jos yrität vetää sitä liian
alhaalta alaspäin. Ota pikalukosta kiinni ylhäältä)

3. Korkeussäätö tapahtuu mustan pikaruuvin avulla. Säädä korkeus
myös edestä, korkeudensäätö edessä tapahtuu poistamalla valkoiset nupit ja
pyörittällä pitkää putkea wc-korottajan alapuolelta. Aseta käsituet nostamalla
niiden pää kuvassa reikään, jolloin pikalukko naksahdtaa



kuva 1



kuva 2



kuva 3

4. Säädä kiinniketapit sopivalle etäisyydelle
toisistaan siten, että ne sopivat wc-istuimesi
reikiin.

Aseta korottaja wc-istuimeesi siten että
kiinniketapit näkyvät alta ja ne ovat suorassa.



5. Aseta pikalukkokeristimet kiinniketappeihin
työntämällä ylös asti, jolloin lukko naksahdtaa
kiinni. Kiristä vielä lukkoa kiertämällä
myötäpäivään ja tarkista että kiristimet
ovat hyvin paikoillaan.

(Huomaa että pikalukkokeristin pitää olla
'auki' kun asetat pikalukot takaisin kiinnike-
tappeihin, Katso tarvittaessa ohje kohta 2.)

6. WC-korottaja on valmis käytettäväksi.
Halutessasi voi nostaa käsituet pois
tieltä tai poistaa ne kokonaan.

WC-korottajan poistaminen:

Poisto tapahtuu vapauttamalla ohjeen
kohdan 2 mukaisesti pikakiristinlukot
ja nostamalla korottajan pois.

