

**Tukimet Oy**

**Valajantie 5**

**26820 RAUMA**


**www.tukimet.fi**

**Myynti:**

**Tukimet@tukimet.fi**

**puh. ( 02 ) 677 4222**

**WC-KOROTTAJA KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ  
336 180  
KÄYTTÖOHJE**

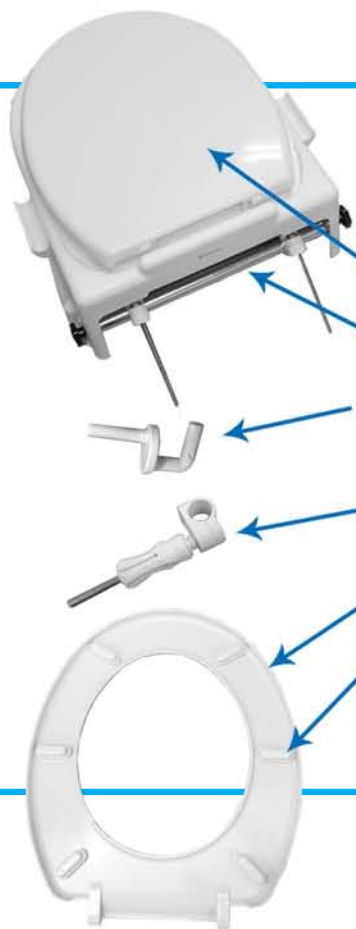

**Varaosat:**

336181 wc-korottaja sääd. Kanssi

336184 wc-korottaja sääd. Tukipuutki

336183 wc-korottaja sääd. kannen ja renkaan  
kiinnitysosa

336186 wc-korottaja sääd. Lukitusruuvi + tapoi

336182 wc-korottaja sääd. Rengas

336185 wc-korottaja sääd. Renkaan tassu





Pakettiin kuuluu wc-korottaja  
käsituet 2 kpl  
ja pikalukkokeristimet 2 kpl

et tarvitse työkaluja asentaessasi  
korottajaa.

Asennuohjeet:

1. Poista rengas ja kansi wc-istuimes-  
tasi. (useimissa malleissa irrotus  
tapahtuu nostamalla.)

2. Irrota kiinni olevat pikalukkokiinnittimet seuraavasti:

- Löysää pikalukkoa kiertämällä sitä muutaman kerran vastapäivään.
- Ota kiinni pikalukon yläosasta kuvassa 1. esitetyllä tavalla, purista voimakkaasti ja vedä sitä alaspäin jolloin pikalukko naksahda ja saat sen vedettyä pois tapista (kuva 2). (Huomaa että pikalukko ei irtoa, jos yrität vetää sitä liian alhaalta alaspäin. Ota pikalukosta kiinni ylhäältä)

3. Korkeussäätö tapahtuu mustan pikaruuvin avulla. Säädä korkeus myös edestä, korkeudensäätö edessä tapahtuu poistamalla valkoiset nupit ja pyörittämällä pitkää putkea wc-korottajan alapuolelta. Aseta käsituet nostamalla niiden pää kuvassa reikään, jolloin pikalukko naksahda



kuva 1



kuva 2



kuva 3

4. Säädä kiinniketapit sopivalle etäisyydelle toisistaan siten, että ne sopivat wc-istuimesi reikiin.

Aseta korottaja wc-istuimeesi siten että kiinniketapit näkyvät alta ja ne ovat suorassa.



5. Aseta pikalukkokeristimet kiinniketappeihin työntämällä ylös asti, jolloin lukko naksahda kiinni. Kiristä vielä lukkoa kiertämällä myötäpäivään ja tarkista että kiristimet ovat hyvin paikoillaan.

(Huomaa että pikalukkokeristin pitää olla 'auki' kun asetat pikalukot takaisin kiinniketappeihin, Katso tarvittaessa ohje kohta 2.)

6. WC-korottaja on valmis käytettäväksi. Halutessasi voi nostaa käsituet pois tieltä tai poistaa ne kokonaan.

**WC-korottajan poistaminen:**  
Poisto tapahtuu vapauttamalla ohjeen kohdan 2 mukaisesti pikakeristinlukot ja nostamalla korottajan pois.

