

654100 | 654200 | 654120 | 654220**Asennusohje:**

Irrota laitakiinnitysosa, ylätuki ja lattiatuki toisistaan löysentämällä kuusiokoloruuveja 1-3 sekä lattiatuen sormiruuvia 4.

Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan noin 60-80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaan).

Laitaosa voidaan asettaa sängynlaidan yläreunan lisäksi myös toisin päin käännettäessä alareunaan, esimerkiksi kun kyseessä on runkopatjasänky.

Kiinnitä laitaosa kiristystassuja 1 ja 2 kuusiokoloavaimella kiristämällä. Aseta lattiatuki linjaan laitaosan aukon kanssa ja aseta ylätuki paikoilleen laitaosan läpi lattiatuen sisään niin, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin.

Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan kuusiokoloruuvi 3 sekä lattiatuen sormiruuvi 4. Tarkista kaikki kiristykset. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.




HUOM! NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTOROITUIHIN SÄNKYIHIN!

Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!



HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.

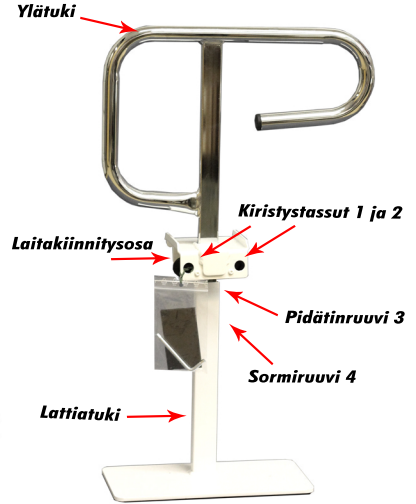

HUOM!

Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varorajamerkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.

Tuotteen asentajan on luettava asennusohje ja katsottava asennusvideo. Asennus ei vaadi erityistaitoja ja se on apuvälineen käyttäjän suoritettavissa.

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso asennus-
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaosastossa!