


Käytä tuotteen kiinnittämiseen 8 kappaletta ruuveja tai läpipultteja riippuen sängynlaidan lujuudesta. (HUOM! Ei sisälly tuotteeseen!)

**Asennusohje: 654100R | 654120R**

Avaa sormiruuvi ja irrota laitakiinnitysosa varsinaisesta tukiosasta. Kiinnitä laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60 cm-80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaisesti). Kiinnitä laitakiinnitysosa kahdeksalla (8) ruuvilla tai läpipulteilla riippuen sängynlaidan lujuudesta.

Aseta varsinainen tukiosa takaisin laitakiinnitysosan sisään siten, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin. Valitse sopiva korkeus ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

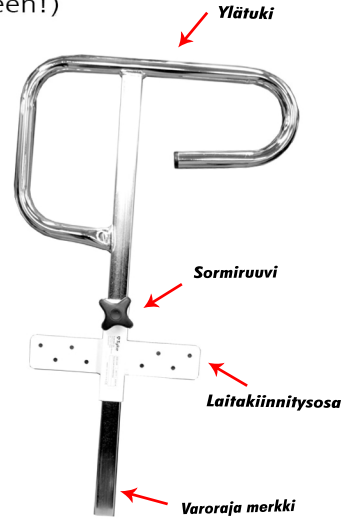

KIINNITYKSEN LUJUUS RIIPPUU SÄNGYN RUNGON PUUOSIEN RAKENTEESTA. JOS MAHDOLLISTA, SUOSITTELEMME ASENTAMAAN MYÖS LATTIATUEN. Nousutukea on saatavilla valmiiksi lattiatuellisena tai lattiatuen voi hankkia lisävarusteena.

**654100RJ | 654120RJ | 654200RJ | 654220RJ**

Kiinnitä laitakiinnitysosa sängynlaitaan. Aseta lattiatuki linjaan laitakiinnitysosan aukon kanssa ja aseta ylätuki paikoilleen laitakiinnitysosan läpi lattiatuen sisään niin, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi sekä lattiatuen sormiruuvi. Tarkista kiinnitys -> **Nousutuki on käyttövalmis.**

**⚠️ HUOM!**

**Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.**



**HUOM! NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN!** Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!



**HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.**

Tuotteen asentajan on luettava asennusohje ja katsottava asennusvideo. Asennus ei vaadi erityistaitoja ja se on apuvälineen käyttäjän suoritettavissa.

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:  
[www.tukimet.fi/ohjekirjat](http://www.tukimet.fi/ohjekirjat)

**Katso asennus-  
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaaomassasi!

Valmistaja: Tukimet Oy | Rauma | [www.tukimet.fi](http://www.tukimet.fi) | [tukimet@tukimet.fi](mailto:tukimet@tukimet.fi)