

# Uppresningsstöd för motordriven ställbar säng

## KORT BRUKSANVISNING

### Installering:

655120R | 655220R | 655120S | 655220S

Lös kantmonteringsdel, stödets överdel och golvstöd från varandra genom att lossa **fingerskruvar**.

Sätt **kantmonteringsdelen** vid böjpunkten av sängens höjbara del (eller närmare fotändan).



**Produkten skall inte installeras någonstans mot sängens huvudända sett från böjpunkten - KLÄMFARA!**

Beroende av produkten, fästa kantmonteringsdelen antingen genom att spänna **fingerskruvarna** eller med åtta (8) **vanliga skruvar** (*OBS! Ingår inte i produkten!*). Sätt **golvstödet** precis under kantdelen och installera **stödets överdel** så att spåret (som finns i överdelen) passar väl in i kantdelen.



**Uppresningstödet överdel kan justeras i tre riktningar. Överdelen skall inte installeras så att den kan roteras ovanför sängen - KLÄMFARA!**

Själva överdelens metalliska stödrör är formad så att detta inte är möjligt.

Anpassa höjden och spänn ordentligt både kantmonteringsdelens **fingerskruv** och golvstödet **fingerskruv**. Se till att uppresningsstödet är starkt fast.  
-> Klar att användas.



**OBS!**

- \* **FJÄRRKONTROLLEN TILL MOTORDRIVEN SÄNG SKALL INTE FÖRVARAS I SÄNGEN!**
- \* **UPPRESNINGSTÖDET SKALL INTE INSTALLERAS PÅ SÄNGAR I DÄR SÄNGENS HÖJD KAN JUSTERAS (sk. sjukhus- och vårdssängar)!**  
I oklara situationer se till tillämplighet!
- \* **SE TILL ATT DET FINNS INGEN MATTA UNDER GOLVSTÖDET!**



**OBS! En säkerhetsmarginal (ett hål) har märkts i botten (5cm) av överstöd. Överstödet skall installeras så att marginalmärkningen inte syns ovanför golvstödet.**

Fullständiga bruksanvisningar på våra produkter hittar du här:  
[www.tukimet.fi/ohjekirjat](http://www.tukimet.fi/ohjekirjat)

**Se installerings-  
video på YouTube:**



Kolla skruvtätheten på skruvar och fingerskruvar regelbundet. För att hålla produkten i funktionellt skick, håll den ren genom att sudda bort all smuts med en fuktig lina och ett skonsamt rengöringsmedel. Felaktiga produkter skall vårdas vid egen hjälpmedelscentral.