

655120R | 655220R | 655120S | 655220S**Asennus:**

Irrota laitakiinnitysosa, ylätuki ja lattiatuki toisistaan löysentämällä sormiruuveja.

Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan moottoroidun noston taitekohtaan (tai lähemmäs jalkopäätä).

Tuotetta ei tule asentaa taitekohdasta katsoen lähemmäs pääpuolen sängyn päätä - PURISTUMISVAARA!

Kiinnitä tuotteesta riippuen laitakiinnitysosa joko sormiruuveja kiristämällä tai kahdeksalla ruuvilla. Aseta lattiatuki linjaan laitaosan kanssa ja laita ylätuki paikoilleen niin, että siinä oleva ura on kohdillaan laitaosan kanssa.

Nousutuen ylätuki on kolmeen eri suuntaan kääntyvä. Tukea ei tule asentaa niin, että ylätuen saa käännettyä sängyn yläpuolelle - PURISTUMISVAARA!

Ylätuen tukiputki itsessään on muotoiltu niin, ettei tämä myöskään ole mahdollista.

Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi sekä lattiatuen sormiruuvi. Tarkista, että nousutuki on tukevasti kiinni.

! HUOM!

- * LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA!
- * MOOTTOROIDUN SÄNGYN KAUKOSÄÄDINTÄ EI SAA SÄILYTTÄÄ SÄNGYSSÄ!
- * NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA SÄNKYIHIN, JOISSA SÄNGYN KORKEUTTA VOIDAAN SÄÄTÄÄ (ns. sairaala- ja hoivasängyt)! Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

Tuotteen asentajan on luettava asennusohje ja katsottava asennusvideo. Asennus ei vaadi erityistaitoja ja se on apuvälineen käyttäjän suoritettavissa.

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso asennus-
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaaamossasi!



! HUOM! Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varorajamerkitä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.