


Istuin:

Aseta istuinosa tuolin runkoon. Paina istuin tukevasti kiinni. Tarkista nostamalla tuolia istuinosaasta, että se on varmasti kunnolla kiinni runko-osassa. Suihku-
tuolin etureuna on oheisessa kuvassa etualalla.



HUOM!

* Vältä istumista aivan istuinosaan reunalla, jotta istuin ei irtoa rungosta!

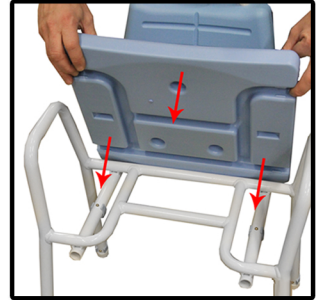


Korkeuden säätäminen:

Irrota pikalukot runko-osan jaloista vetämällä pikalukkoa itseäsi kohde. Työnä korkeudensäätöjalka runko-osaan. Valitse sopiva korkeus ja lukitse korkeudensäätöjalka runkoon työntämällä pikalukko takaisin paikoilleen.

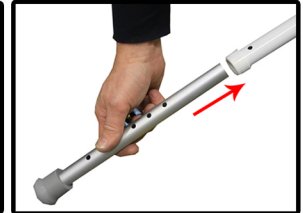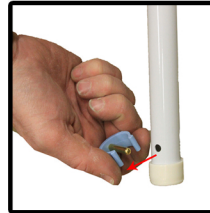

* Varmista, että pikalukot ovat kunnolla kiinni ja että ne lävistävät kokonaan molemmat jalkojen putket.

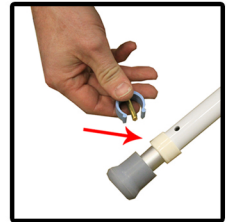

Kallistuksen säätö:


Yksi tuotteen jaloista on kallistuksen säätöjalka, jossa ei ole lainkaan kumitulppaa ja jonka tassullista ruuvia kiertämällä voidaan tasata suihkutilan mahdollista kallistusta.



Selkänöja (lisävaruste):

Aseta selkänöjan putket sisään runkoon suoran väliputken puolelta. Selkänöjalle on valittavissa kaksi eri syvyyttä. Valitse sinulle sopivampi ja lukitse selkänöja runkoon pikalukoilla.

* Varmista, että pikalukot ovat kunnolla kiinni ja että ne lävistävät kokonaan molemmat putket.

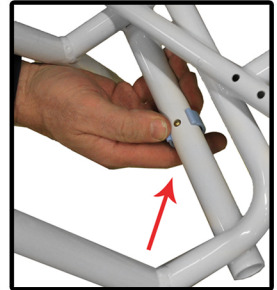

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso käyttöönotto-
video YouTubessa:**



Tarkista säännöllisesti laitteen yleinen kunto ja kiinnikkeiden pitkäikäisyys. Pidä suihkutuoli puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaaomassasi!