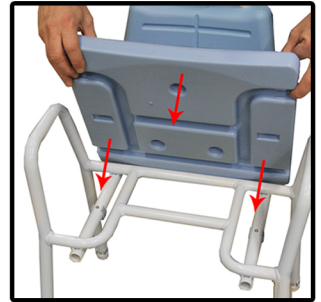


Säte:

Lägg sätet på ramen. Tryck på sätet så att det fastnar i ramen (det finns spår i botten av sätet som ramen passar in i). Ta ett grepp om sätet och lyft stolen för att se till att sätet är väl fast i ramen. Duschstolens framsida syns närmast i bilden bredvid.

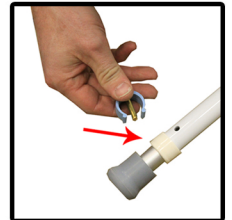
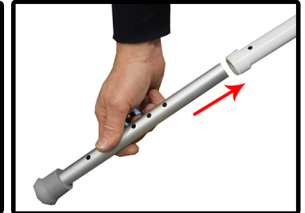
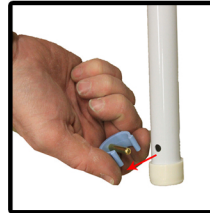
OBS!

* Sätt inte dig på kanten av sätet för att hindra det från att lossna från ramen!

**Höjjustering:**

Ta bort snabblåsen från rambenen genom att dra låset mot dig själv. Sätt höjjusterbara benet i ramen. Välj passande höjd och lås höjjusterbara benet i ramen genom att sätta snabblåset tillbaka i sitt hål.

* Se till att snabblåsen är väl placerade och att de går genom båda sidor av benrören.

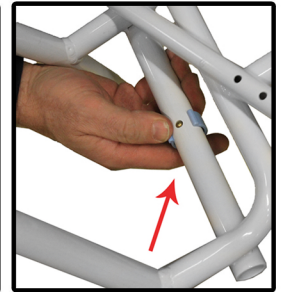
**Lutningsjustering:**

Ett av produktens ben justerar lutningen och det har ingen gummipropp. Genom att rotera benets fotdel kan stolen justeras så att den står i balans också på golv som har lutning.

**Ryggstöd (extrautrustning):**

Sätt ryggstödet i ramen från mellanliggande rörs sida. Det finns två alternativ för ryggstödet djup. Välj det som passar bättre och sätt snabblåsen i sina hål.

* Se till att snabblåsen är väl placerade och att de går genom båda sidor av rören.



Fullständiga bruksanvisningar på våra produkter hittar du här:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Se installerings-
video på YouTube:**



Kolla produktens allmänna skick regelbundet och att snabblåsen sitter väl fast. För att hålla duschstolen i funktionellt skick, håll den ren genom att sudda bort all smuts med en fuktig lina och ett skonsamt rengöringsmedel. Felaktiga produkter skall vårdas vid egen hjälpmedelscentral.

