

Asentaminen:**Irrotettavat wc-korottajat**

Poista rengas ja kansi WC-istuimesta (useimmissa malleissa irrotus tapahtuu nostamalla). Mikäli WC-korottajan asennus onnistuu pitävästi ilman renkaan ja kannen poistamista, voidaan ne jättää myös paikoilleen. Nosta tällöin rengas ja kansi ylös ennen asennusta.

Aseta kiinnitystallat WC-korottajan sivuille kuvan mukaisella tavalla. Kiinnitystalla asennetaan siten, että tällä asetetaan WC-korottajan alareunassa olevaan koloon ja painetaan kevyesti. Kierrä kiinnitystallan ruuvista, jolloin se liikkuu sisäänpäin.

Aseta korottaja WC-istuimen päälle. Kiristä kiinnitystallat kiertämällä ruuveja, jolloin tallat painautuvat WC-istuimen ulkoreunaan kiinni ja korottaja asettuu paikoilleen.



WC-korottajan irrotus ja kiinnittäminen tapahtuu löysäämällä tai kiristämällä kiinnitystallojen ruuveja.

Tarkista, että korottaja on tukevasti paikoillaan. WC-korottaja on käyttövalmis.

WC-korottajan poistaminen:

Löysää WC-korottajan kiinnitystalloja kiertämällä ruuveja ja nosta WC-korottajan pois wc-istuimelta.

**Puhdistusohjeet:**

Puhdistetaan pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla desinfiioivalla puhdistusaineella. Tuote voidaan myös suihkutella puhtaaksi. Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita, ph-arvo 5-9 tai 70 % desinfiointiainetta.

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:

www.tukimet.fi/ohjekirjat

TARKISTA KIINNITYSTALLOJEN KIREYS JA LAITTEEN YLEINEN KUNTO SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJAIN.

Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!